

Aquafluor

Description:

Aquafluor est un verni de fluorure à base de résine acrylique aqueuse, testé cliniquement. Aquafluor sert à fluorer les surfaces et les collets hypersensibles. L'émulsion sèche à l'air et forme un film adhésif qui ramouillit dans la salive en libérant du fluorure. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures, ce qui fait que des quantités minimales de fluorure sont suffisantes pour une fluoration optimale. Dès que le verni est complètement amolli, la fluoration s'arrête et le film adhérent se dissout de la surface dentaire. Aquafluor contient 0,15 % de fluorure pure.

Propriétés:

- 0,15 % de pur fluorure
- Libération continue de fluorure du verni séché
- Produit soluble dans l'eau
- Sèche à l'air

Avantages:

- Pas besoin de secouer l'émulsion avant l'usage
- Idéal pour enfants (dose faible de fluorure)
- Libération à longue durée de petites quantités de fluorure

Indication:

Recommandé pour traiter les surfaces et les collets hypersensibles des dents, pour la prophylaxie, la réduction d'une susceptibilité aux caries élevée, la reminéralisation de l'émail dentaire traité.

Propriétés physiques:

Couleur:	blanc
Densité:	1,02 - 1,03 g/ml
PH:	4,3 – 4,8
Concentration de fluorure:	1,0 - 1,5 g/l

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C.

Durée de conservation: 3 ans

Présentation:

WP4005: 1 x bouteille de 5 ml + 50 x pinceaux + 1 x porte-pinceau

WP4004: 1 x bouteille de 10 ml

